



ARNESES

www.carimatech.com / **Qinera**GROUP[®]

Arneses Carima

Nuestros arneses son versátiles, ya que se adaptan a diferentes capacidades de movilidad y necesidades de uso. Fabricados con materiales de última generación y un diseño innovador, cada arnés está pensado para ofrecer máxima funcionalidad, confianza y seguridad en las transferencias.

¿Por qué elegir los arneses de Carima?

1. Diseñados y probados para garantizar la protección del usuario en todo momento.
2. Gracias a nuestro sistema antropométrico, los arneses aseguran una distribución óptima del peso y generan gran comodidad para el usuario.
3. Fabricados con materiales suaves y de alta calidad que protegen la piel y evitan rozaduras.
4. Funcionan en todo tipo de transferencias: cama, silla, inodoro, ducha y más. Se ajustan a cada usuario y situación.

**LOS DISEÑOS HAN SIDO COMPROBADOS
Y TESTADOS POR LOS CENTROS DE REFERENCIA
MÁS IMPORTANTES**



ELECCIÓN DE UN ARNÉS

La elección de un arnés depende de varios factores, como las **necesidades del usuario** y el **tipo de tarea** que se va a realizar.

Es importante recordar que ninguna descripción puede garantizar que un arnés sea **la mejor opción** para una persona o situación concreta.

Las especificaciones técnicas sirven como una **guía general**, pero no sustituyen una valoración individual hecha por un profesional.



CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA



CORRECTA PRESCRIPCIÓN

Es importante elegir un arnés adecuado, teniendo en cuenta las características del usuario, sus necesidades específicas y el tipo de movimiento o transferencia que se debe realizar.

Recomendamos evaluar cada caso con un Terapeuta Ocupacional u otro profesional cualificado.

DECLARACIÓN DE CALIDAD

Los arneses están fabricados siguiendo los más altos estándares de calidad ISO y cumplen con la normativa EN, esto asegura un producto fiable, duradero y seguro.

Cada arnés cuenta con un número de serie único que permite identificar tanto a la persona que lo ha fabricado como a la que lo ha inspeccionado. Gracias a este sistema de trazabilidad, en el improbable caso de que surja un defecto, podemos rastrear el origen y solucionarlo rápidamente.

Además, todos los arneses cuentan con el sello CE y cumplen con la normativa europea, confirmando así nuestro compromiso con la calidad y la seguridad en cada detalle.

COMPATIBLES Y FÁCILES DE USAR

Nuestros arneses son compatibles con la mayoría de las grúas del mercado, lo que garantiza su versatilidad y facilidad de uso.

Para evitar interrupciones y estar siempre preparado, recomendamos tener al menos un arnés de reserva que permita realizar las tareas de manera continua y segura.


Los asistentes y cuidadores deben conocer las tareas y saber cómo usar los arneses correctamente.

Este documento sirve como guía general de información, pero si necesitas una formación personalizada, ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.



ATENCIÓN CON LA PIEL

Las personas con úlceras también necesitan ser transferidas, y usar un arnés inadecuado puede generar problemas graves. Por eso, contamos con modelos especialmente diseñados para estos casos, que ayudan a **reducir los riesgos de presión y cizallamiento**, brindando mayor comodidad y seguridad durante cada transferencia.

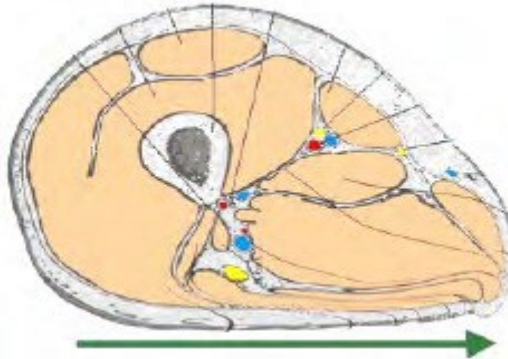

Durante una transferencia, la presión en los muslos puede ser hasta **9 veces mayor**.

En estos casos, las personas no deberían usar **arneses con apertura para inodoro**, especialmente si tienen un peso elevado, ya que pueden aumentar los riesgos de lesiones.

El **tipo de tela** del arnés también juega un papel importante en estos casos. Los materiales que no son deslizantes pueden causar daños al poner o quitar el soporte para las piernas. Sólo en algunas partes del arnés, un material con mayor fricción puede ser útil para **mejorar el posicionamiento y la seguridad**.



ESTADO DEL ARNÉS

Recuerda, se ha de comprobar que el arnés está en buenas condiciones antes de realizar la elevación.

Antes de usar el arnés, revisa que no tenga daños, rasgaduras o esté deteriorado. Las cinchas llevan un hilo de color diferente para que sea más fácil identificarlas y comprobar su estado.

El arnés debe de sustituirse sino está en perfectas condiciones. Se considera una buena práctica si una persona dentro de la organización comprueba los arneses todas semanas dejando constancia de la fecha.

**EL ARNÉS DEBE DE SER EXAMINADO,
ASÍ COMO LA GRÚA, POR UNA PERSONA
HOMOLOGADA CADA 6 MESES Y DEBE MANTENER
REGISTRO DE LAS REVISIONES**



¿SOPORTE O ACCESO?

Los arneses con mayor acceso son muy prácticos para tareas de higiene o para usar el inodoro. Sin embargo, también distribuyen la carga de manera más exigente, lo que puede aumentar algunos riesgos para el usuario.

Si una persona tiene poca fuerza muscular, puede deslizarse hacia la parte inferior del arnés, lo que puede provocar una mala postura y presión incómoda en zonas como las piernas y detrás de las rodillas. Además, el soporte para las piernas puede no funcionar como debería, aumentando el riesgo de molestias o lesiones.

Si la persona lleva los brazos dentro del arnés, podría caer a través de la apertura. Por otro lado, si los brazos están fuera, pero la persona tiende a deslizarse, esto podría causar dislocación de hombros, daño en los nervios o bloqueo de la circulación sanguínea.

**ES IMPORTANTE ELEGIR EL ARNÉS DE
ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA
USUARIO**



PREVENCIÓN DE CAÍDAS

Una de las causas de caídas más comunes son los movimientos impredecibles de los usuarios. Es importante escoger el modelo de arnés teniendo en cuenta este factor.

Si el usuario tiende a moverse de forma impredecible, recomendamos los arneses con cinchas extensoras, como el **Arnés Comfort Premium** y el **Arnés Ergo**, ya que se adaptan mejor al movimiento y ofrecen mayor seguridad. En cuanto a los arneses con apertura para inodoro, suelen ser menos seguros, a excepción de los modelos **Arnés Intima Safe** y **Arnés Balance**, que destacan por su estabilidad.

Los cinturones de seguridad se pueden añadir a cualquiera de nuestros modelos para mayor protección.

Reclinar hacia atrás al usuario aumenta la seguridad al prevenir caídas hacia adelante, aunque puede dificultar la correcta colocación en la silla. Existen técnicas especializadas para facilitar esta tarea, que pueden ser enseñadas por expertos cualificados.

**PARA PREVENIR CAÍDAS, SE DEBEN USAR ARNESES
PARA MOVIMIENTOS IMPREDECIBLES Y OPCIONES
CON CINCHAS EXTENSORAS O RECLINACIÓN**



REQUERIMIENTOS PARA EL CUIDADO DEL ARNÉS

Los arneses están sometidos a cargas considerables, por lo que el deterioro puede influir en la seguridad. Esta es la razón por la cual un arnés debe de sustituirse, cuando está gastado o dañado.

LA CAUSA PRINCIPAL DE DESGASTE DE UN ARNÉS ES EL PROCESO DE LAVADO.



Un lavado incorrecto no solo puede reducir su vida útil, sino también aumentar el riesgo de infecciones o incluso provocar un fallo en su funcionamiento.

Recomendaciones para **maximizar la duración del arnés y mantenerlo en buen estado:**

- Lávalo adecuadamente a 40°C con un jabón suave.
- Evita el uso de lejía o productos agresivos que puedan dañar el tejido.
- Déjalo secar al aire, no uses secadora ni plancha.
- Cierra todos los velcros y hebillas antes de lavarlo.

¿Solo tienes un arnés? Recuerda que siempre es buena idea contar con al menos uno de reserva para evitar problemas si algo sucede con el que usas regularmente.



SIGNIFICADO DE LOS **ICONOS**



USO EN BAÑERA



ADECUADO PARA USUARIOS
CON AMPUTACIÓN POR
ENCIMA DE LA RODILLA



ADECUADO
PARA ELEVAR PERSONAS
DESDE SUELO/CAMA



COMPATIBLE
CON PROTECCIÓN ESPECIAL
DE LA CABEZA PARA UNA
MEJOR SUJECIÓN




COMPATIBLE
CON EL USO
DEL BAÑO



ELEVACIÓN
POSIBLE
DESDE LA SILLA
DE RUEDAS



ELEVACIÓN
POSIBLE DESDE
LA SILLA DE RUEDAS
CON MOLDE

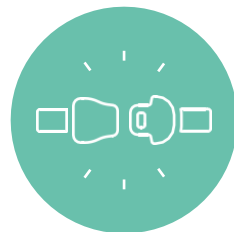


MODELO
DE ENGANCHE
CLIP DISPONIBLE



ADECUADO
PARA
VESTIR/DESVESTIR



65KG
200KG
350KG

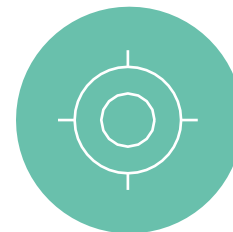

SE PUEDE COLOCAR
CUANDO ESTÁ SENTADO
EN LA SILLA



GUÍA DE ARNESES ÚNICA

ARNÉS Intima (CVPT)

Este modelo está pensado para facilitar las actividades de baño e higiene del usuario.

Fabricado con un acabado de poliéster de tejido suave, está diseñado para ser delicado con la piel y brindar comodidad a la vez que otorga seguridad.



Fácil de colocar y retirar

Apertura para mejor acceso y facilitar la higiene

Sin costuras en las axilas

Drenaje efectivo y secado rápido

Sistema de seguridad ajustable



USO EN
BAÑERA



ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA



ENGANCHE
CLIP



200kg

ARNÉS Flex (CVUP)

Este arnés ofrece gran comodidad al usuario, gracias a las secciones para las piernas sin bordes que facilitan su colocación y ajuste. Esto reduce la presión detrás de las rodillas y minimiza la fricción y el arrastre al colocar.

Óptimo para brindar confort y practicidad en distintas situaciones de transferencia.




Fácil de colocar y retirar

Secciones de pierna en forma cónica para facilitar el acceso al arnés

Apertura para actividades de baño e higiene

Sin bordes en la zona de las piernas

Apto para diferentes necesidades

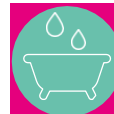

USO EN
BAÑERA



ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA



AMPUTADOS



ELEVACIÓN
DESDE SILLA



ENGANCHE
CLIP



200kg

ARNÉS Comfort (CVHP)

Este diseño combina un tejido suave de poliéster con una tela deslizante en las zonas de las piernas y la columna.

Ofrece mayor comodidad para el usuario junto con durabilidad y un rendimiento óptimo.



Fácil de colocar y retirar

Secciones de tela antideslizante que minimiza la fricción y el arrastre

Compatible con casi todas las necesidades

Material resistente

Soporte para la cabeza y gran comodidad



USO EN
BAÑERA



ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA



AMPUTADOS



PROTECCIÓN
CABEZA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA



ENGANCHE
CLIP



200kg

ARNÉS Balance (12018FO)

Este arnés está diseñado específicamente como una herramienta de rehabilitación para ayudar a las personas a pasar de una posición sentada a una posición de pie.

Ofrece soporte en el pecho, la espalda y los brazos. Es fácil de usar y óptimo para ejercicios de movilidad y rehabilitación de manera cómoda y controlada.



Es un arnés de asistencia al caminar

Incluye correas para las piernas para brindar soporte adicional y mayor estabilidad


Compatible con barras de 4 a 6 ganchos

Cumple con los estándares de calidad

De fácil mantenimiento



USO EN
BAÑERA

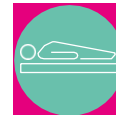

ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA




AMPUTADOS



PROTECCIÓN
CABEZA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA

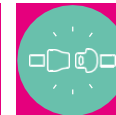

ENGANCHE
CLIP



350kg

GUÍA DE ARNESES ZENITH

ARNÉS Intima Plus (CC2)

Este modelo está diseñado para ofrecer un acceso fácil y cómodo al baño, garantizando seguridad y facilitando el ajuste posterior de la ropa.

Óptimo para personas que no necesitan sujeción en la parte superior del tronco ni de la cabeza, pero que aún buscan un arnés con un buen nivel de apoyo y confort.



Excelente acceso al baño con buen apoyo comparado con arneses de formas parecidas

Puede ser válido para usuarios a los que previamente se les había desaconsejado el uso de un arnés de acceso al inodoro.



PARA
VESTIR



USO WC



ELEVACIÓN
SILLA CON
MOLDE



COLOCACIÓN
SENTADO



ELEVACIÓN
DESDE LA SILLA



ENGANCHE
CLIP




350KG

ARNÉS Intima Safe (CGP)

Es la solución perfecta para quienes buscan seguridad y comodidad en tareas de higiene. Su diseño facilita el acceso al baño y el ajuste de la ropa gracias a su sujeción frontal, además de proporcionar un excelente soporte en la parte superior del tronco y un apoyo confiable para la cabeza.


Destaca por ofrecer un nivel de confort y estabilidad superior a otros arneses, convirtiéndose en la opción más segura y cómoda del mercado.

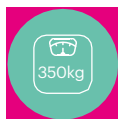

350kg



AMPUTADOS

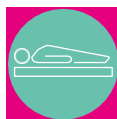

ELEVACIÓN
DESDE
SILLA/CAMA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA



ENGANCHE
CLIP



PROTECCIÓN
CABEZA

Gracias a su amplia apertura, este arnés ofrece un excelente acceso posterior e inferior, combinado con un buen soporte para la espalda que reduce la tendencia a deslizarse hacia la apertura de abajo.

Mantener los brazos dentro del arnés aumenta la comodidad, mientras que el soporte para la espalda y la unión de piernas ayudan a reducir la sensación de inseguridad que puede generar la apertura para inodoro.

El soporte para la espalda no solo brinda comodidad, sino que permite levantar al usuario de forma segura desde una posición tumbada, algo que no es posible con otros arneses diseñados para acceso al baño.

Los apoyos para las piernas están acolchados para mayor comodidad y fabricados con un material especialmente deslizante que facilita su colocación.

El soporte para la cabeza complementarse con refuerzos adicionales si es necesario.



ARNÉS Comfort Premium (GXTP)

Diseñado para adaptarse a la mayoría de personas y tipos de transferencias. Su material deslizante facilita la colocación y retirada. Además, cuenta con un gran respaldo que proporciona máxima seguridad y un excelente apoyo para la cabeza del usuario, garantizando comodidad y confianza en cada uso.



Transferencias desde baño/cama/suelo/silla

Extremadamente confortable para las piernas, espalda y cuello

Adecuado para la gran mayoría de usos y personas

Adecuado para personas con bajo tono o sin control de la sedestación

Adecuado para personas hipertónicas y espasmos incontrolados

Adecuado para personas con amputaciones dobles o sencillas por encima de la rodilla

Fácil de poner por los materiales ultra deslizantes (óptimo para colocar desde la silla)

Minimiza los riesgos de úlceras por presión y cizallamiento

Posibilidad de reforzar el soporte del cuello de forma sencilla

Tallas pequeñas y para personas de peso elevado

Sistema profesional de selección de la talla



COLOCACIÓN
SENTADO



USO WC



USO EN
BAÑERA



350KG



AMPUTADOS



ENGANCHE
CLIP



ELEVACIÓN
SUELO/CAMA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA

ARNÉS Ergo (GXF)

El arnés Ergo está pensado para personas con **caderas anchas**, ofreciendo un ajuste seguro. Es buen complemento al arnés Comfort Premium, diseñado para quienes necesitan **soporte extra en los miembros inferiores**.

Gracias a su **material deslizante**, es posible su colocación y retirada desde silla de ruedas. Además, su **amplio respaldo** garantiza un apoyo completo y seguro, ofreciendo también soporte para la cabeza del usuario.

Muchos arneses convencionales tienen soportes para las piernas muy cortos y no llegan rodear la cintura y los muslos

Este arnés está diseñado para caderas anchas y muslos grandes

Al poder ajustarse alrededor de la cintura y debajo de los muslos, ayuda a prevenir las úlceras.



USO EN
BAÑERA



ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA



USO WC



AMPUTADOS




COLOCACIÓN
SENTADO




PROTECCIÓN
CABEZA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA

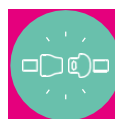

ENGANCHE
CLIP

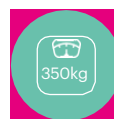

350kg

ARNÉS AQUA (GXB)

Este modelo se caracteriza por su excelente drenaje del agua y por su secado rápido.

Es la solución perfecta para garantizar comodidad y funcionalidad en entornos acuático y húmedos como piscinas.

Óptimo para los ambientes húmedos.

Rápida velocidad de secado con respecto a otros arneses.



USO
EN BAÑERA



ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA



AMPUTADOS




PROTECCIÓN
CABEZA



ELEVACIÓN
DESDE LA SILLA



ENGANCHE
CLIP

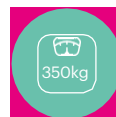

350KG

ARNÉS Serena (GPS)

Arnés diseñado específicamente para personas que utilizan asientos moldeados en la silla de ruedas. Su fabricación es ultra fina para que entre en el molde y facilite la transpiración.

La tela es resistente pero suave, manteniendo el asiento cómodo para el usuario.



Circulación del aire alrededor del usuario

Bolsillos para guardar las correas cuando no están en uso

Fácil de colocar y de retirar

Diseñado para dejar puesto en la silla

Resistente para uso prolongado



ELEVACIÓN
SILLA CON
MOLDE



ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA



AMPUTADOS



PROTECCIÓN
CABEZA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA



ENGANCHE
CLIP



200KG

ARNÉS Alba (GAIR)

Este modelo está diseñado para dejar el arnés colocado en el asiento de la silla de ruedas, ofreciendo una solución práctica para algunos usuarios.

Aunque muchos arneses están fabricados con materiales transpirables, algunos asientos o cojines pueden dificultar la ventilación, causando acumulación de calor y sobrecalentamiento.

Para resolver esto, hemos integrado malla 3D, un material innovador que lleva la comodidad a otro nivel.

Su diseño único, con surcos que permiten la circulación del aire, mantiene la piel fresca y cómoda en todo momento, asegurando una experiencia mucho más agradable.



Diseñado para ser dejado puesto en la silla cuando quitar el arnés sea un riesgo para la piel


Basado en la última tecnología textil: malla 3D de poliéster

Permite la circulación del aire alrededor del usuario

Con bolsillos para recoger los lazos cuando no se usa el arnés, evitando que se enganchen en las ruedas de la silla

Correa extensora que logra una sensación de suspensión

Diseño sin apertura que maximiza el confort

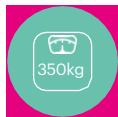

350kg



AMPUTADOS



ENGANCHE
CLIP



ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA



PROTECCIÓN
CABEZA

ARNÉS Balance Premium (GHUG)

Su diseño aporta múltiples beneficios y lo convierte en una opción óptima para gimnasios, escuelas y hogares.

Puede usarse como arnés de sujeción elevada o para apoyar el aprendizaje y la práctica de caminar, adaptándose a diversas necesidades.

Es perfecto para transferir a personas con hipertonía o movimientos involuntarios, gracias a que garantiza estabilidad. Su gran soporte en la espalda permite incluso elevar a una persona desde el suelo.

Óptimo para hipertónicos

Óptimo para hipotónicos

Recomendado para personas con movimientos involuntarios

Para entrenar la práctica de caminar

Con acceso al inodoro

Adecuado para colocarse en posición de sentado



350kg



AMPUTADOS



ENGANCHE
CLIP



ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA



PROTECCIÓN
CABEZA

ARNÉS Flow (PATRON)

Diseñado para ofrecer máxima independencia al usuario. Su estructura con armazón metálico brinda soporte desde las axilas hasta las piernas, asegurando estabilidad y seguridad gracias a su material resistente.

Recomendado para personas con buena fuerza muscular, ya que requiere cierta capacidad física. Óptimo para quienes buscan mayor libertad de movimiento.



Arnés de uso autónomo

Consiste en una doble percha regulable a las medidas del usuario


Zona de sujeción lavable y resistente al agua

Práctica de deambulación

Uso en piscina



USO EN
BAÑERA

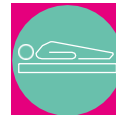

ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA



AMPUTADOS



PROTECCIÓN
CABEZA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA



ENGANCHE
CLIP



350kg

ARNÉS Brisa (Brisa)

Cuidar de pacientes en tareas de higiene íntima puede ser una tarea exigente, pero con las soluciones adecuadas, se convierte en un proceso más fácil.

Los arneses para piernas permiten realizar estas tareas sin necesidad de girar al paciente. Esto hace que el proceso sea más cómodo, eficiente y seguro tanto para el paciente como para los asistentes.



USO EN
BAÑERA



ELEVACIÓN
DESDE
SUELO/CAMA



AMPUTADOS



PROTECCIÓN
CABEZA



ELEVACIÓN
DESDE SILLA



ENGANCHE
CLIP




Sábanas Glissa (LGF140200)

Las sábanas deslizantes están diseñadas para facilitar las transferencias de personas con movilidad reducida de manera segura y eficiente.

Con un recubrimiento de silicona en ambas caras y un diseño sin costuras prominentes, garantizan un deslizamiento óptimo y minimizan el riesgo de fricción o esfuerzo para el usuario y el cuidador.

Son reutilizables, altamente duraderas y aptas para múltiples ciclos de lavado sin perder sus propiedades deslizantes.

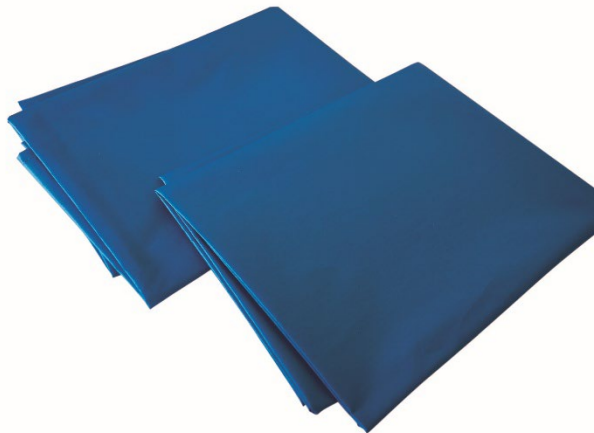

Tela recubierta con silicona en ambas caras

Apto para más de 100 lavados sin perder eficacia en el deslizamiento

Incluye gancho para colgar

Disponible en distintos tamaños y formatos

Su diseño con baja fricción facilita la transferencia del usuario con menor esfuerzo

ELECCIÓN DE LA TALLA

SEGÚN UN SENCILLO PRINCIPIO ANTROPOMÉTRICO

Elegir la talla incorrecta es una de las principales causas de accidentes, por eso hemos desarrollado un método antropométrico, seguro y confiable, para ayudarte a seleccionar la talla adecuada.

Nuestro sistema utiliza medidas específicas de diferentes partes del cuerpo (altura, perímetros, etc.) para asegurar un ajuste más preciso y personalizado. Además, siempre puedes contar con nuestro apoyo y asesoramiento si tienes alguna duda.

¿Cómo elegir la talla adecuada?

- Mide la altura de la persona mientras está tumbada.
- En mujeres, mide el contorno de las caderas.
- En hombres y niños, el contorno del pecho justo debajo de los hombros.

Nota: si el perímetro de las caderas no encaja con las tallas Unisex, consulta por nuestro arnés Ergo.

PRODUCTO	ALTURA	PERIMETRO	MAX PESO	TALLA	COLOR
niños	75-95	45-55	200	1	blanco
	95-110	50-60	200	2	rojo
	110-130	55-70	200	3	amarillo
	130-150	65-80	200	4	verde
adulto unisex	135-160	70-85	200	5	blanco
	145-170	75-90	200	6	rojo
	155-180	85-100	200	7	amarillo
	160-190	95-115	200	8	verde
	160-190	105-130	200	9	negro
	160-190	125-150	275	10	blanco
	160-190	145-175	350	11	rojo
	160-190	170-200	350	12	amarillo
Ergo	130-155	85-100	200	5	blanco
	135-160	95-110	200	6	rojo
	140-165	105-125	200	7	amarillo
	140-165	120-140	200	8	verde
	140-165	135-155	200	9	negro
	140-165	150-175	275	10	blanco
	140-165	170-200	350	11	rojo



¡GRACIAS!

www.carimatech.com