



INSTRUCCIONES MOTOR FIX

www.carimatech.com / **Qinera**GROUP[®]

INSTRUCCIONES MOTOR FIX


Estación de carga: Para cargar las baterías, coloca el elevador en el extremo del riel, en la ubicación de la estación de carga. Asegúrate de que haga contacto correctamente con los puntos de carga para garantizar una carga eficiente. Se recomienda revisar periódicamente que la estación de carga esté libre de obstrucciones y en buen estado para un rendimiento óptimo y una mayor vida útil de la batería.

CARGA DE LA BATERÍA

En ambos casos, el elevador indicará el proceso de carga mediante una **línea intermitente en la pantalla**.

Cuando el nivel de carga de las baterías descienda por debajo de un umbral determinado, en la pantalla del elevador aparecerá la indicación **"bAt"**. En ese momento, será necesario recargar las baterías.


Aun con la advertencia de batería baja, el elevador podrá seguir operando entre **3 y 6 elevaciones** antes de agotarse por completo. Se recomienda proceder con la carga lo antes posible para evitar interrupciones en su uso.

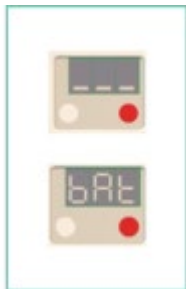

PESO MÁXIMO


200Kg.

Una batería totalmente descargada puede provocar daños permanentes.

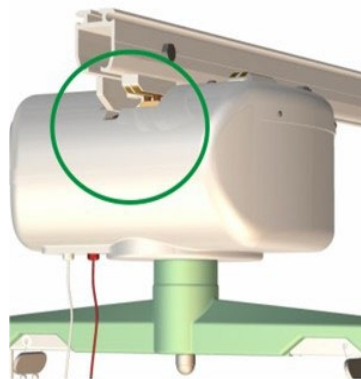

INSTRUCCIONES MOTOR FIX

El elevador Fix cuenta de serie con las funciones de **Parada de emergencia** y **Descenso de emergencia**, garantizando mayor seguridad y control en cualquier situación.

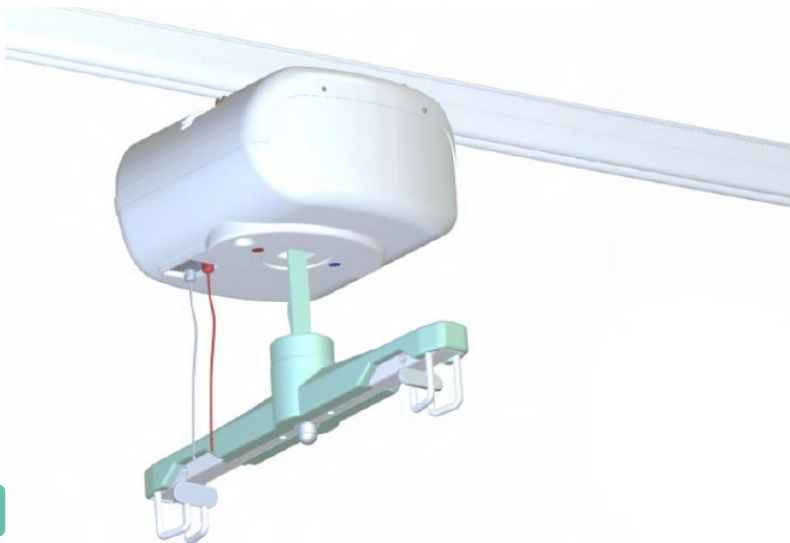

PARADA DE EMERGENCIA

Para activar la parada de emergencia, tire una vez de la **cuerda roja**. Esto deshabilitará el botón **UP/DOWN (arriba/abajo)** del mando.

Para reanudar el funcionamiento, simplemente vuelva a tirar de la cuerda roja.

DESCENSO DE EMERGENCIA

Antes de iniciar el descenso, asegúrese de que la superficie debajo de la persona sea segura y adecuada.

Para activar el **descenso de emergencia**, tire lentamente de la **cuerda blanca**. Esto permitirá que el elevador descienda de manera controlada.





¡GRACIAS!

www.carimatech.com